

Single Cartridge Hand Dispenser

SHD Series

Uso previsto

Un dispensador manual para usar con **MASTDISCS®** en cartuchos.

Contenido

Los packs SHD1 contienen un dispensador mientras los packs SHD5 contienen 5 dispensadores. Otros tipos de tamaños de packs pueden estar disponibles de vez en cuando.

Composición

Un accesorio de plástico azul moldeado, para usar con metodologías de examen de difusión de disco tradicionales.

Diseñado teniendo en mente a los usuarios de cartucho ocasionales, el dispensador manual ofrece un modo rápido, fácil y de coste-efectividad para dispensar discos de cartuchos individuales.



Procedimiento

1. Sujetar el dispensador por el extremo superior estrecho.
2. Insertar el cartucho en el soporte cilíndrico con los discos expuestos mirando hacia abajo.
3. Alinear la muesca en el cartucho con la ranura en el dispensador.
4. Pulsar el cartucho hacia abajo hasta que haga clic en su sitio.
5. Para dispensar un disco, pulsar el lateral flexible hacia el cartucho. Un disco será dispensado.
6. Una vez que el cartucho ha sido usado, puede ser quitado tirando del cartucho vacío hacia arriba y el dispensador puede ser rellenado y reutilizado con otros cartuchos.

Almacenamiento y caducidad

Los dispensadores pueden almacenarse a temperatura ambiente. Una vez en uso, deben de almacenarse a 2 a 8°C, siempre que los discos y el soporte se mantengan en un almacenamiento hermético, que incorpore gel de silica desecante. Dejar siempre que el dispensador y el cartucho se equilibren a temperatura ambiente antes de su apertura.

Precauciones

Exclusivamente para uso diagnóstico *in vitro*. Respetar las precauciones de seguridad y técnicas asépticas. Debe ser utilizado solo por personal de laboratorio cualificado y con experiencia. Antes del desecho, esterilizar todo el material biológico.