

Single Cartridge Hand Dispenser

Séries SHD

Utilisation

Distributeurs manuels pour cartouches unitaires **MASTDISCS®**.

Présentation

SHD1 contient un distributeur alors que SHD5 contient 5 distributeurs. Autres présentations possibles.

Description

Dispositif en plastique bleu pour distribuer les disques antibiotiques pour la méthode de diffusion en gélose. Désigné pour un usage occasionnel des cartouches antibiotiques, le distributeur manuel permet de distribuer rapidement, facilement et économiquement les disques d'une cartouche unitaire.



Procédure

1. Maintenir l'extrémité la plus étroite vers le haut.
2. Introduire la cartouche dans le tube avec les disques apparents dirigés vers le bas.
3. Aligner le clapet de la cartouche avec l'encoche du distributeur.
4. Enfoncer la cartouche jusqu'à enclencher sa mise en place.
5. Appuyer latéralement sur le bras souple pour distribuer le disque.
6. Si la cartouche est vide, la retirer du distributeur et recharger avec une autre cartouche.

Conservation

Les distributeurs non chargés sont stockés à température ambiante. Les distributeurs chargés doivent être stockés à 2 à 8°C dans un récipient fermé contenant du gel de silice comme déshydratant. Les distributeurs chargés doivent toujours être ramenés à température ambiante avant ouverture du récipient.

Précautions

Usage In Vitro uniquement. Observer les précautions de danger potentiel et les techniques aseptiques en vigueur. A n'utiliser que par du personnel technique qualifié et formé. Stériliser tout les déchets avant de les éliminer.