



Mast Diagnostica · Postfach 1131 · D-23854 Reinfeld

**An alle Anwenderinnen und Anwender  
der MASTABLOT TP Testkits**

Feldstraße 20  
D-23858 Reinfeld

Telefon 0 45 33 / 20 07-0  
Telefax 0 45 33 / 20 07-68  
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

Ihr Zeichen:

Ihr Schreiben:

Unser Zeichen: sf

Datum: 2007-09-03

**Betreff: Alternative Testdurchführung MASTABLOT TP**

Als Hersteller und Vertreiber der MASTABLOT TP-Produkte versichern wir, dass die Seruminkubation der Teste optional auch über Nacht bei 2-8 °C durchgeführt werden kann. Eine Inkubation auf einem Schüttler ist dabei nicht notwendig.

Bei der Über-Nacht-Inkubation ist darauf zu achten, dass die Probe mit dem Diluent gut gemischt wird und die Lösung die Blotstreifen gleichmäßig überschichtet. In unseren internen Versuchen erhielten wir sowohl für die IgG- als auch für die IgM-Nachweise ein Reaktionsverhalten, das dem der Standard-Inkubationsbedingung gemäß Gebrauchsinformation entspricht.

Wir können Ihnen hiermit versichern, dass die Kriterien und Anforderungen der CE-Kennzeichnung auch für die Über-Nacht-Inkubation des MASTABLOT TP Testes gelten.

MAST DIAGNOSTICA  
Laboratoriumspräparate GmbH

Dr. S. Frischmann  
(Herstellungsleiter)