


PeliControl & PeliControl CcEe-K

Vollblut für die Qualitätskontrolle

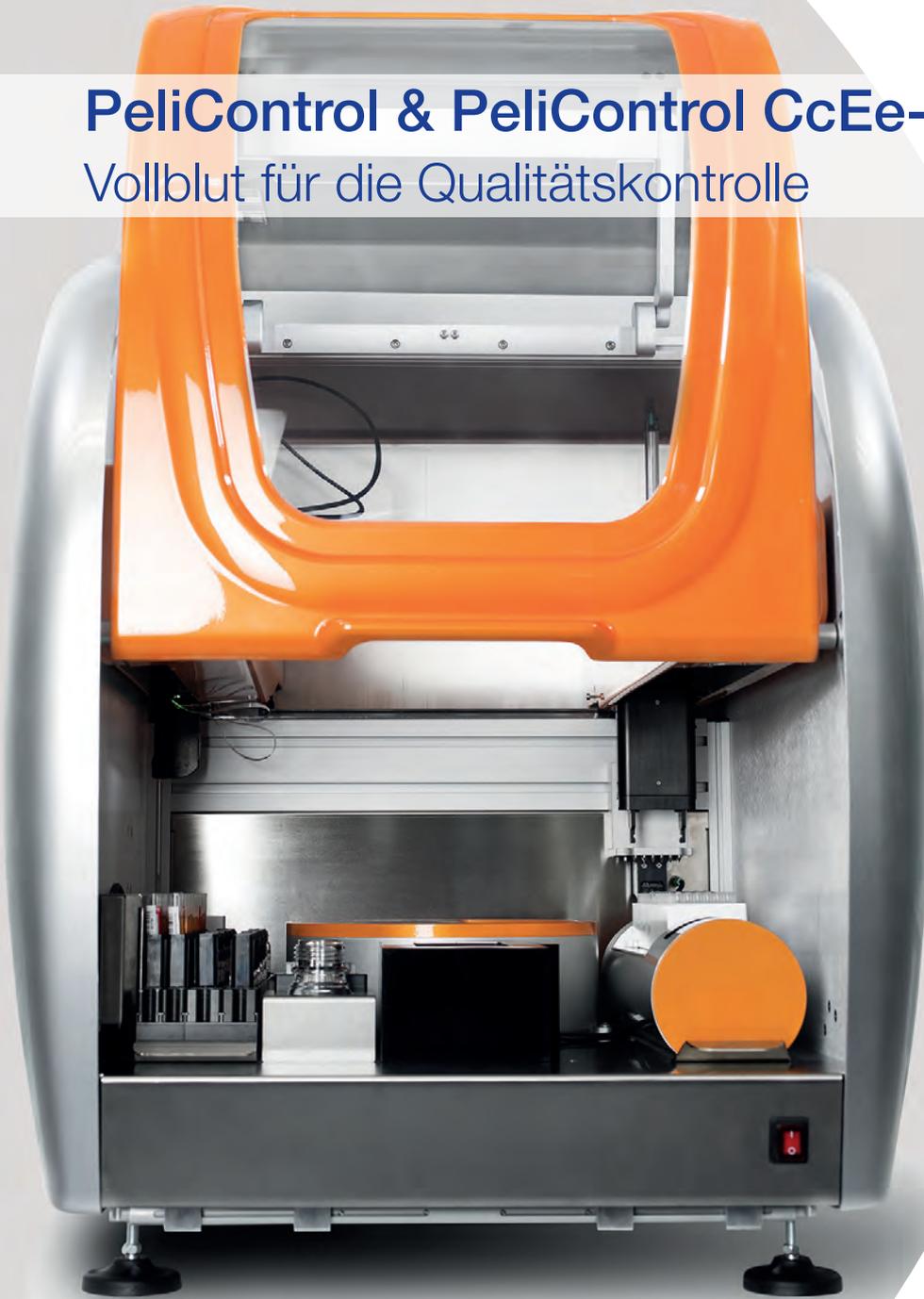

- **PeliControl**
Vollblut für die tägliche
Qualitätskontrolle

- **PeliControl CcEe-K**
Vollblutkontrolle zum Überprüfen des
Rhesus-Phänotyps und der Kell Blutgruppe

Um akkreditiert zu werden, müssen Labore routinemäßig Qualitätskontrollen durchführen. Aus diesem Grund hat Sanquin Reagents zwei Produkte entwickelt, mit denen die Durchführung von Blutgruppenbestimmungen überprüft werden können.

PeliControl

Vollblut für die tägliche Qualitätskontrolle



2 x 8 mL Vollblut

PeliControl besteht aus 2 Röhrchen, die wie 2 Patientenproben abgearbeitet werden können. Damit hat man sowohl eine positive als auch eine negative Kontrolle für die Bestimmung von Blutgruppen (AB0/RhD) und für den Antikörpersuchtest.



PeliControl ist geeignet für die Kontrolle von semi- und vollautomatisierten Blutgruppensystemen, aber auch für manuelle Methoden, um die Herstellung von Zellsuspensionen zu überprüfen.

PeliControl ist gemäß IVD Standards validiert und CE markiert.

Der Test ist für die manuelle Röhrchenmethode, für den WA DIANA von Diamed, für den Autovue von Ortho und für den Magister (Cellbind) von Sanquin validiert. Er ist auch auf anderen Systemen einsetzbar, sobald das Labor eine Validierung durchgeführt hat.

Röhrchen 1: Blutgruppe A(2)B RhD positiv mit AB Serum

Röhrchen 2: Blutgruppe 0 RhD negativ mit Anti-A,B und Anti-D im Serum



Schwächste zu erwartende Reaktionsstärken:

P.C.	A			B			A,B			D1			D2			A1			A2			B			SCR.			CELL 1			SCR.			CELL 2			SCR.			CELL 3		
	CTRL	CTRL	CELL	R.T.	37 °C	AHG	CCC	R.T.	37 °C	AHG	CCC	R.T.	37 °C	AHG	CCC	R.T.	37 °C	AHG	CCC	R.T.	37 °C	AHG	CCC																			
1	3+	3+	3+	2+	2+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1+	0	0	0	1+	0	0	0	1+	0	0	0	1+	0	0	0	1+	0	0	0	1+							
2	0	0	0	0	0	0	0	0	2+	2+	2+	0	0	1+		0	0	1+		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0								

PeliControl CcEe-K

Vollblutkontrolle zum Überprüfen des Rhesus-Phänotyps und der Kell-Blutgruppe

Zusätzlich kann eine weitere Kontrolle bestellt werden, um andere wichtige Blutgruppensysteme zu überprüfen.

Röhrchen: Blutgruppe ABD variiert von Charge zu Charge, CcEe-K positiv.

Schwächste zu erwartende Reaktionsstärken:

C	c	E	e	K
2+	2+	2+	2+	2+

Bestellinformation

CE 0344

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
546004	PeliControl	2 x 8 mL
546006	PeliControl CcEe-K	1 x 8 mL

MD V.2.0 / 2022-02-17

Sanquin Reagents B.V.

Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 (0)20-5123599

Fax: +31 (0)20-5123570

e-mail: reagents@sanquin.nl

www.sanquin.nl



Vertrieb durch:

Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0

Fax: +49 (0)4533 2007 68

e-mail: mast@mast-diagnostica.de

www.mast-group.com

